





Tvätta händerna och ta på handskar innan du börjar provtagningen.

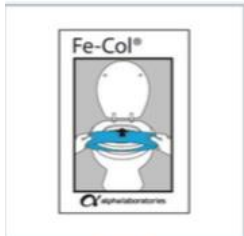

Fäst uppsamlingspappret på toalettringen enligt instruktionerna på uppsamlingspappret.

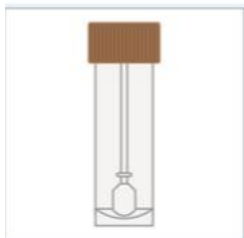

Skruva av locket på uppsamlingsröret med brunt lock.



Använd den lilla spateln och lägg en liten mängd avföring i röret (en skopa räcker).



Skruva på locket ordentligt och skaka röret försiktigt tills all avföring löst upp sig i vätskan.

Tag rätt etikett till rätt rör/prov

Ref			
saliv	03331262		Saliv
avföring	03331263		Avföring
T			
RID	00212923		

A red arrow points to the 'Avföring' barcode.

Sätt fast streckkoden som du hittar längst ner på remissen på röret. Var noga så du tar streckkoden där det står "Avföring".