




Skruva av locket från tuben och lägg det åt sidan för framtida användning

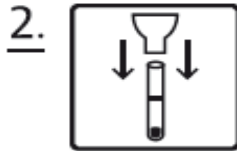

Sätt fast tratten i tuben




Använd dina händer och gnugga dina kinder mot dina tänder i 30 sekunder



Samla saliv i tuben upp till den markerad nivån, undvik bubblor när du mäter upp



Ta bort tratten och släng bort den. Skruva på locket igen, hårt

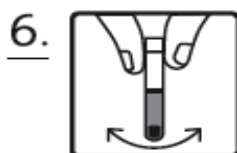

Skaka varsamt på tuben i 15 sekunder för att lösa upp reagensen i tuben



Förvara tuben upprätt i 2–20 minuter, skaka då och då tills reagensen är upplöst. Viss grumlighet kan förekomma under denna process. Det här är ok!

8.



Sätt fast streckkoden som du hittar längst ner på remissen på röret. Var nog så du tar streckkoden där det står "Saliv".