





Tvätta händerna och ta på handskar innan du börjar provtagningen.



Ta fram det lilla svarta röret med orange lock samt borsten som ser ut som en lång tops. Var noga med att borsten inte nuddar någon annan yta innan provtagningen.

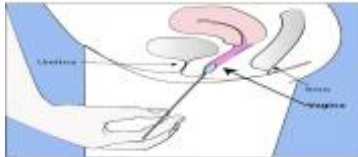

För in borsten 2–3 cm in i slidan.

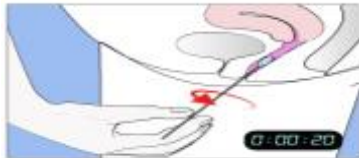

Rotera borsten i ca 20 sekunder.



Sätt in borsten i den lilla svarta tuben med orange lock och bryt av borsten vid tubens kant.



Skruva på det orangea locket ordentligt och sätt fast streckkoden som du hittar längst ner på remissen runt röret